



KONSULTACJA



1



KROK PIERWSZY

Aby upewnić się, że implantacja jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem, skonsultuj się z lekarzem. Metody diagnostyczne: RTG i TK (tomografia komputerowa) .




Bio3 Implants GmbH,
Germany

Pforzheim,
Hanauer Str. 8, 75181

www.bio3-implants.com



PROCES ODBUDOWY PO WSZCZEPIENIU IMPLANTU

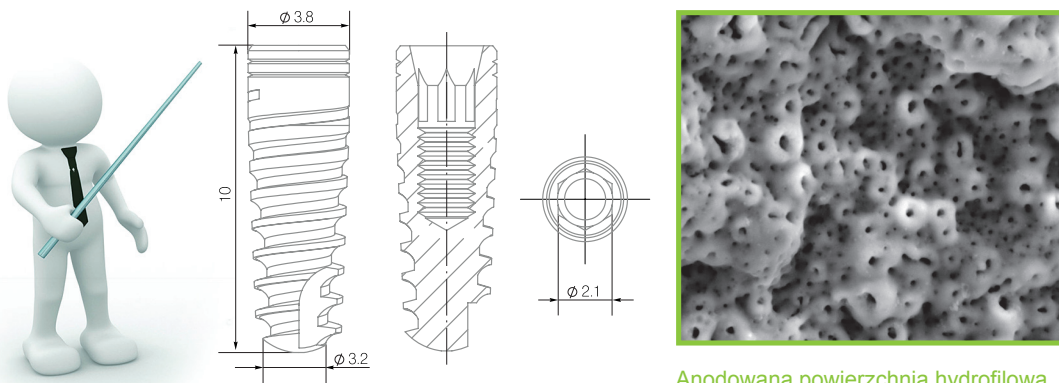

Anodowana powierzchnia hydrofilowa

2



KROK DRUGI

Lekarz wybiera system odbudowy w zależności od konkretnego przypadku klinicznego. Konstrukcje mogą być ruchome, cementowane lub przykręcane. Aby wybrać odpowiedni system dentystyczny, należy zwrócić uwagę na:

- Kształt i powierzchnię implantu
- Łatwość umieszczania
- Gwarancję producenta

MĄDRY WYBÓR



3



KROK TRZECI

Dlaczego Implanty Bio3?

Ponieważ procedura implantacji jest prosta, łatwa i wysokiej jakości.

System implantów Bio3 to:

- Precyzyjne połączenie stożkowe
- Anodowana powierzchnia hydrofilowa
- Niemiecka jakość i niezawodność
- Dożywotnia gwarancja



Bio3 Implants GmbH,
Germany

Pforzheim,
Hanauer Str. 8, 75181

www.bio3-implants.com



UMIESZCZENIE IMPLANTU



4



KROK CZWARTY

Umieszczenie implantu jest praktycznie bezbolesną procedurą, która niewiele różni się w odczuciach od innych zabiegów stomatologicznych. Zwykle trwa to nie dłużej niż 30 minut.

OKRES ZAGNIEŹDŹENIA



5



KROK PIĄTY

Okres zagnieżdżenia trwa od 3 do 6 miesięcy w zależności od przypadku klinicznego. Tymczasowa proteza korony może rozwiązać kwestię estetyczną i może być założona na implancie natychmiast po jego umieszczeniu według uznania lekarza.

FORMOWANIE DZIAŚEŁ



6



KROK SZÓSTY

Nakładka gojąca jest zakładana po okresie zagnieżdżenia implantu na 7-10 dni i jest wstępnym leczeniem przed dalszą protetyką.



Bio3 Implants GmbH,
Germany

Pforzheim,
Hanauer Str. 8, 75181

www.bio3-implants.com



POBIERANIE WYCISKÓW



7



KROK SIÓDMY

Pobieranie wycisków odbywa się 10 dni po założeniu nakładki gojącej. Procedura trwa około 15-20 minut (w zależności od przypadku klinicznego), a wycisk jest następnie wysyłany do laboratorium dentystycznego.



Bio3 Implants GmbH,
Germany

Pforzheim,
Hanauer Str. 8, 75181

www.bio3-implants.com



SPRAWDZENIE DOPASOWANIA



8



KROK ÓSMY

Lekarz dopasowuje strukturę wykonaną w laboratorium dentystycznym i w razie potrzeby dokonuje korekt.



Bio3 Implants GmbH,
Germany

Pforzheim,
Hanauer Str. 8, 75181

www.bio3-implants.com





KROK DZIEWIĄTY

Lekarz mocuje protezę dentystyczną na implantach i przedstawia pacjentowi zalecenia. Gratulujemy nowego uśmiechu!

Nie zapomnij o planowanej wizycie kontrolnej u swojego lekarza dokładnie po 3 miesiącach.



Bio3 Implants GmbH,
Germany

Pforzheim,
Hanauer Str. 8, 75181

www.bio3-implants.com

