

Zachowanie wydajności systemu ssącego. System higieny Dürr Dental

Systematyczna dezynfekcja i czyszczenie systemu ssącego



System Higieny firmy Dürr Dental – poczucie, że pomyślało się o wszystkim

4 obszary, 4 kolory – po prostu logiczne, po prostu pewne

W przypadku ochrony przed zakażeniami, dezynfekcji oraz czyszczenia niczego nie należy pozostawiać przypadkowi. Dlatego w systemie higieny firmy Dürr Dental proste użytkowanie, pewne i logiczne zastosowanie znajdują się na pierwszym miejscu. Firma Dürr Dental wprowadziła do higieny logiczny system kolorów – różowy do skóry i rąk, żółty do obszarów specjalnych, niebieski do instrumentów i zielony do powierzchni.



Ponad 30 produktów Systemu Higieny firmy Dürr Dental zapewnia większe bezpieczeństwo i sukces w codziennych czynnościach higienicznych w gabinecie

Pewność

- Szerokie spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze (wraz z koronawirusami)
- Sprawdzone, godne zaufania działanie
- Wszystkie środki znajdują się na liście VAH/DGHM i są zgodne z EN
- Wysoka skuteczność dezynfekcji i czyszczenia

Wygoda

- Proste i wydajne w użyciu
- Poręczne, wygodne opakowania
- Czyszczenie według planu
- Dozowanie za pomocą nakrętek
- Wysokowydajne

Nieszkodliwość

- Unikalna kombinacja substancji czynnych
- Szczególna pielęgnacja i ochrona dłoni
- Najwyższa kompatybilność materiałowa, zalecane przez wiodących producentów unitów
- Testowane klinicznie
- Ulega biodegradacji

Szybkość

- Krótki czas działania
- Szybkie wysychanie bez pozostałości
- Praktyczna aplikacja
- Łatwe dozowanie

Nasi specjaliści od dezynfekcji i czyszczenia systemu ssącego

Łatwe w użyciu – silne w działaniu

Przed ponad 50 latami firma Dürr Dental dzięki środkowi Orotol® zapoczątkowała dezynfekcję instalacji ssących. Dzisiaj Orotol® plus jest najczęściej stosowanym środkiem dezynfekującym na rynku. Przyczyny są oczywiste: łatwość użycia, szerokie spektrum działania, wysoka kompatybilność materiałowa. Sukces preparatu Orotol® plus oparty jest na długoletnim doświadczeniu firmy Dürr Dental z instalacjami ssącymi. Dürr Dental zalicza się do prekursorów stałego odsysania i umożliwił dzięki temu oczywiste dzisiaj leczenie pacjenta w pozycji leżącej.

Zaufajcie kompetencjom i sile lidera rynku higieny w gabinecie.

Mit nabierania odporności

W przypadku dezynfekcji nabieranie odporności jest w zasadzie niemożliwe. Tylko w przypadku zastosowania zbyt małej dawki środka dezynfekującego zarazki nie zostaną zlikwidowane, a dalej się namnażają. W przypadku prawidłowego dozowania przetrwanie zarazków jest wykluczone. Stąd też zmiana produktu po kilku latach nie jest konieczna.

Najważniejsze cechy:

- Najwyższa kompatybilność materiałowa
- Szybkie i kompleksowe działanie
- Kompetencja producenta urządzeń i środków higienicznych
- Perfekcyjna symbioza technologii i chemii
- Oryginał – doświadczenie od 1965 roku



Skuteczny zestaw do instalacji ssących



Kompleksowa pielęgnacja i maksymalne bezpieczeństwo

Codzienna dezynfekcja instalacji ssących jest standardem w każdym gabinecie. Mimo tego niemal połowa wszystkich instalacji ma ograniczoną wydajność na skutek złożeń i osadów. Przyczyna: większość z nich jest co prawda dezynfekowana, lecz nie są poddawane dodatkowemu czyszczeniu. Jest to jednak konieczne, bo przecież mamy do czynienia z wieloma agresywnymi substancjami, np. krew, wydzieliny, tkanki zęba, wypełnienia czy proszek do piaskarki. Tworzą one twarde osady. Prowadzi to do zatykania, które skutkuje spadkiem wydajności systemu ssącego, a w najgorszym przypadku do całkowitego unieruchomienia gabinetu.

Rozwiązanie od Dürr Dental: Orotol® plus i MD 555 cleaner

Orotol® plus i MD 555 cleaner w połączeniu chronią wszystkie elementy składowe instalacji ssącej (także przewody!) przed osadami, drobnoustrojami i złożami. Przy regularnym stosowaniu pomagają zapobiegać zmniejszeniu wydajności i przedłużają żywotność Państwa instalacji ssącej. Instrukcja prawidłowego użytkowania znajduje się na stronie 06.



OroCup firmy Dürr Dental umożliwia łatwe dozowanie, a dzięki temu zmniejsza wkładany wysiłek

Orotol® plus Dezynfekcja systemu ssącego

Niepieniący się, wysoce wydajny koncentrat w płynie do jednoczesnej dezynfekcji, dezodoryzacji, czyszczenia i pielęgnacji wszystkich instalacji ssących i separatorów amalgamatu.

- Do systemów ssących, zalecany przez wiodących producentów unitów
- Bakterie nie nabierają na niego odporności
- Sprawdzona kompatybilność materiałowa
- Zachowanie wartości instalacji ssącej
- Rozpuszcza biofilm oraz zapobiega tworzeniu się złożeń (krew, białko)
- Działanie długofalowe
- Szerokie spektrum działania

Substancje czynne

Czwartorzędowe związki amonowe

Wielkość opakowania

Butelka 2,5 l
Butelka 1 l

Zastosowanie w

OroCup



MD 555 cleaner Specjalny środek czyszczący

Niepieniący się koncentrat do stomatologicznych instalacji ssących i separatorów amalgamatu.

- Silne działanie czyszczące przeciwko osadom z proszków do piaskarek
- Rozpuszcza złoże i zatory z wapnia i proszku do piaskarek (odwapniacz)
- Skutecznie rozpuszcza piaski Pearl do profilaktyki
- Idealny w połączeniu z Orotol® plus
- Skuteczny skład – kwasy organiczne i niepieniące się tensydy

Wielkość

opakowania
Butelka 2,5 l

Zastosowanie w

OroCup



Orotol® plus: Konsekwentnie usuwa

- Bakterie
- Drożdże
- Wirusy (wraz z HBV, HCV, HIV i koronawirusy), działa na adenowirusy, bezotoczkowe i norowirusy



MD 555 cleaner: Konsekwentnie usuwa

- Proszek do profilaktyki
- Produkty Pearl do profilaktyki
- Sole/węglany
- Wapń

W ten sposób utrzymujecie Państwo sprawność swojej instalacji ssącej



Orotol® plus

Aplikacja odbywa się po zakończeniu pracy, w przypadku większego obciążenia 2 x dziennie (w południe i wieczorem).

1. W celu czyszczenia wstępnego: odessać 2 litry wody
2. Przygotowanie roztworu w systemie pielęgnacyjnym.* Dla jednego unitu zabiegowego: dopełnić 20 ml (1 nakrętkę) preparatu zimną wodą do 1 litra i wymieszać (w przypadku 2 unitów zabiegowych – podwójna ilość)
3. Założyć węże ssące do systemu pielęgnacyjnego i odessać roztwór
4. Przygotować kolejny 1 litr roztworu i rozdzielić na maksymalnie cztery spluwaczki
5. Pozostawić na minimum 1 godzinę lub na noc
6. Po upływie czasu działania/następnego dnia rano odessać 2 litry wody

*Wykorzystanie systemu pielęgnacyjnego z adapterami węzów ssących do odsysania mieszaniny roztworu i powietrza. Zasysanie bez odpowiedniego adaptera z pojemnika lub podobnego naczynia nie jest zalecane do dezynfekcji i czyszczenia. Zalecamy stosowanie OroCup.




MD 555 cleaner

Aplikacja odbywa się 1 do 2 razy w tygodniu (np. we wtorek i czwartek), a w przypadku większego obciążenia – codziennie przed przerwą obiadową.

1. W celu czyszczenia wstępnego: odessać 2 litry wody
2. Przygotowanie roztworu w systemie pielęgnacyjnym.* Dla jednego unitu zabiegowego: dopełnić 50 ml (2,5 nakrętki) preparatu zimną wodą do 1 litra i wymieszać (w przypadku 2 unitów zabiegowych – podwójna ilość)
3. Założyć węże ssące do systemu pielęgnacyjnego i odessać roztwór
4. Przygotować kolejny 1 litr roztworu i rozdzielić na maksymalnie cztery spluwaczki
5. Pozostawić na co najmniej ½ do 2 godzin (przerwa obiadowa)
6. Po upływie czasu działania odessać 2 litry wody



Z Orotol® plus i MD 555 cleaner

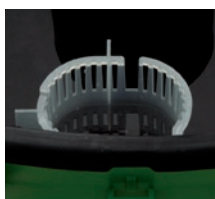


Zbiornik amalgamatu, bez osadu



Bęben wirówki kręci się – bez osadu



Obudowa wirówki, absolutny brak złożeń

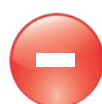

Bez Orotol® plus i MD 555 cleaner



Zbiornik amalgamatu, pełen osadu



Bęben wirówki, osad powoduje obniżenie sprawności



Bęben wirówki, pełen złożeń – całkowita awaria pompy ssącej

Idealne uzupełnienie

MD 550 Oczyszczacz do splotaczek o działaniu mikrobiologicznym

Niepieniący się, gotowy do użyciu roztwór do wysoce efektywnego czyszczenia i pielęgnacji splotaczek.

- Bezproblemowo usuwa pozostałości wapnia, krwi, tabletek barwiących do kamienia nazębnego, materiałów do formowania itd.
- Czyści splotaczki, działając antybakteryjnie (bakteriobójczo/grzybobójczo)
- Niezwykle przyjemny zapach
- Bez składników szorujących
- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa

Wielkość opakowania

Butelka 750 ml



Porady od lidera rynku Dürr Dental dotyczące zachowania wartości systemu ssącego

- Po każdym pacjencie, a przed dezynfekcją lub czyszczeniem, odessać co najmniej jedną szklankę wody za pomocą splotaczki i węży ssących – usuwa to krew, ślinę i resztki zębiny oraz zapobiega zatykaniu lub całkowitej awarii systemu ssącego.
- Przy użyciu środka dezynfekującego używaj zimnej wody: Ciepła woda dezaktywuje wiele składników dezynfekujących i ma tendencję do pienia się i koagulacji w połączeniu z krwią.
- Uporczywe osady kamienia mogą, jak w gospodarstwie domowym, prowadzić do uszkodzeń urządzeń i instalacji rurowych. W zależności od twardości wody stosować MD 555 cleaner min. 1 raz w tygodniu.
- Korzystać wyłącznie z niepieniących się produktów – nie stosować w systemie ssącym środków do dezynfekcji instrumentów/powierzchni, środków do zmywania ani domowych preparatów do czyszczenia.
- Unikać mieszania produktów - może to prowadzić do neutralizacji środka dezynfekującego.
- Nie korzystać z systemu ssącego jak z odkurzacza do szuflad itp.
- Przeprowadzić zalecane prace konserwacyjne.

Spektrum działania i zastosowanie – przegląd

	Dezynfekcja	Czyszczenie	na liście VAH	Na liście środków dezynfekujących IHO	sprawdzony wg norm UE	bakteriobójczy	prątkobójczy	drożdżakobójczy	grzybobójczy	w ograniczonym stopniu wirusobójczy	w ograniczonym stopniu wirusobójczy plus	Wirusobójczy	Stężenie / czas działania w min
Orotol® plus Dezynfekcja systemu ssącego	■	■	■	■	■	■		■		■			2%/5 ¹
Orotol® ultra Dezynfekcja systemu ssącego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	1%/5 ¹
MD 555 cleaner Specjalny preparat czyszczący do systemów ssących		■											5%/30-120
MD 550 Oczyszczacz do spluwaczek		■		■	■	■		■					100% ¹

¹bakteriobójczy/drożdżakobójczy.